

IPOS - Medical

EU Distributor: IPOS - HANDEL GmbH

Robert-Bosch-Str. 3 89250 Senden +49 7307 35804-33

info@ipos-medical.de www.ipos-medical.de



(EU) 2016/425 CE 2841

EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

ATEMSCHUTZMASKE FFP2

(EN)	Protective Mask FFP2
(ES)	Mascarilla de respiración FFP2
(FR)	Masques de protection respiratoire FFP2
(IT)	Mascherine di protezione FFP2
(NL)	Ademhalingsmasker FFP2
(TR)	Solumun maskesi FFP2
(EL)	Αναπνευστήρας FFP2
(BG)	Дихателна маска FFP2
(CS)	Dýchací přístroj FFP2
(NO)	Åndedrettsmaske FFP2
(RU)	Маска-респиратор FFP2
(HU)	Légzőkészülék FFP2
(DA)	Respiratormaske FFP2
(ET)	Hingamisaparaat FFP2
(LT)	Respiratoriaus kaukė FFP2
(PL)	Maska oddechowa FFP2
(LV)	Respiratora maska FFP2
(SV)	Andningsskydd FFP2
(PT)	Máscara respiratória FFP2
(SL)	Maska FFP2
(RO)	Masca respiratorie FFP2
(SK)	Respirátorová maska FFP2



IPOS - Medikal Dış Ticaret A.Ş.
Eyüp Sultan Mahallesi Yedigöller Sokak No: 14
Sancaktepe / İSTANBUL
www.iposmedikal.com.tr

LÉGZŐKÉSZÜLÉK FFP2

(HU)

Rendeltetésszerű használat

Az FFP2 maszk egyéni védőeszköz (PPE), és elsősorban a részecskéktől, cseppektől és aeroszoloktól védi a maszk viselőjét.

A maszk a saját és mások védelmét szolgálja azáltal, hogy belégzőeszkör megszűri a levegőt, és kilégzés során.

A maszk felhelyezése

Kérjük, vegye figyelembe az ebben az utasításban és a csomagoláson található piktogramokat, amelyek leírják, hogyan kell felhelyezni a maszkot.

A használat előtt

1. Mielőtt felhelyezné a maszkot, ellenőrizze, hogy a kezei tiszták-e. Kérjük, ellenőrizze, hogy a maszk minden egyes alkatrésze sérülésmentes-e.

A sérült maszk nem használható, és azonnal meg kell semmisíteni.

2. Alaposan mossa meg a kezét, mielőtt felhelyezi a maszkot.

3. Hajtsa szét a maszkot, hogy egy héj keletkezzen.

4. Helyezze a maszkot a száj és az orr területére, és állítsa az orrkengyelt az orr alakjához.

5. A másik kezével helyezze a fülhurkokat mindkét fülre.

6. Használat előtt ellenőrizze a megfelelő illeszkedést az alábbiak szerint:

- Mindkét kezével takarja le a maszkot anélkül, hogy befolyásolná a maszk illeszkedését.

- Lélegezzen ki mélyen. Ha az orr körül szivárog a levegő, állítsa be az orrkengyelt alakját a fent leírtak szerint.

- Ha levegő távozik a maszk szélén, korrigálja a fülhurok helyzetét. Ha nem sikerül megfelelő illeszkedést elérni, akkor nem léphet be a veszélyes térbe.

Figyelmeztetések és korlátozások

- A felhasználónak használat előtt meg kell ismernie a légzőkészüléket, és követnie kell a használati utasítást.
- A maszk nem szolgáltat oxigént, így használata a környező légkör függvénye. Csak megfelelően szellőztetett helyiségekben használja. Ne használja a maszkot robbanásveszélyes légkörben.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a maszk nem sérült-e.
- Az arcszűrőzet szívárgást okozhat.
- A maszkot nem szabad összenyomni vagy deformálni.
- Ne mossa ki.
- Ne helyezzen törülközőt, zsebkendőt stb. a maszk belsejébe.
- Ne használja, ha a maszk szennyezett.
- Ne érintse meg a maszk felületét a viselése után.
- A műszak végén ártalmatlanítsa a maszkot. A maszk testét nem szabad kézzel megérinteni. A maszk levétele után a kezeket meg kell mosni.
- **AZ ITT LEÍRT FIGYELMEZTETÉSEK A MASZK TELJES ÉLETTARTAMÁRA VONATKOZNAK ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA BETEGSÉGEKHEZ ÉS EGÉSZSÉGHÁROSODÁSHOZ VEZETHET:**

Jóváhagyások:

Ez a termék a DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR szerint lett jóváhagyva.

2022/01/01

EU-Konformitätserklärung



IPOS-Modul C2



IPOS-CE-Zertifikat



ISO 9001 TÜV-Süd



ISO 13485



(HU) Elhasználható termék



(HU) Tartsa be a mellékelt használati utasítást



(HU) Figyelmeztetések és korlátok



(HU) Tiszta és száraz helyen tárolja



(HU) Hőmérséklettartomány



(HU) Minőségét megőrzi



(HU) Gyártási dátum



(HU) Gyártó címe

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el: www.futunatura.hu/ipos-medical

Az egyéni védőfelszerelési rendeletnek való megfelelés megállapításában részt vevő bejelentett szervezet neve, címe, azonosító száma: MNA Laboratuvarlarl San. Tic.Ltd.Şti, Küçükbakkalköy Mahallesi, Yenidoğan Caddesi No:21 Ataşehir / Istanbul - Turkey (2841)
A maszkok megfelelnek az egyéni védőeszközökről szóló (EU) 2016/425 rendeletnek és az EN 149:2001 + A1:2009 szabványoknak.